

FICHA TÉCNICA HOSPITALARIA

SANIT SURFACES

Propiedades

Toallitas desinfectantes de superficies de ámbito sanitario

El producto cumple con las siguientes normas de eficacia a 5 minutos de contacto en condiciones sucias:

UNE-EN 13727 Eficacia Bactericida

UNE-EN 13624 Eficacia Levuricida y fungicida

UNE-EN 14476 Eficacia Virucida

UNE-EN 16615 Eficacia Bactericida y levuricida

Eficacia viricida frente a Virus Vaccinia y frente a virus de la diarrea viral bovina (BVDV).
Eficacia viricida frente a Coronavirus 229E.

Nº Registro AEMPS: 1514-DES

Características

CONTROL MICRO CADA LOTE ENVASADO	
PATÓGENOS (ENVASADO)	AUSENTE
TOTAL VIABLES MICRO (ENVASADO)	1000 UFC/G MAX
ASPECTO (GRANEL)	LIQUIDO
ASPECTO (ENVASADO)	LIQUIDO
COLOR (GRANEL)	INCOLORO
COLOR (ENVASADO)	INCOLORO
OLOR (GRANEL)	CARACTERISTICO
DENSIDAD (GRANEL)	1 ± 0.02
INDICE DE REFRACCION (GRANEL)	5 ± 2
PH (GRANEL)	12 ± 1
LIMPIEZA DEPOS. CONTROL PH	0.1 MAXIMA
LIMP. DEPOS. ESPUMA	AUSENCIA
% DDAC (GRANEL)	0.3 ± 0.05
% BIS (3-AMINOPROPIL)DODECILAMINA (GRANEL)	0.25 ± 0.02

Fecha Impresion: 15-01-25 Fecha Versión: 15-01-25 Versión: 4 Código: 0001321 Nombre: SANIT SURFACES

FICHA TÉCNICA
HOSPITALARIA

SANIT SURFACES

CONTROL PESO TOALLITA

7 ± 0.5

Aplicaciones

Producto indicado para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies de contacto en el ámbito sanitario.

Limpieza con acción mecánica y sin necesidad de aclarado.

Dosificación y modo de empleo

Abrir el envase, extraer una toallita con las manos limpias y cerrar de inmediato la tapa para mantener la eficacia del producto. Frotar con la toallita la superficie a desinfectar, humedeciendo el área a razón de 1 toallita por m² y mantener la superficie húmeda el tiempo necesario según la eficacia deseada. Respetar el tiempo de contacto indicado, según la actividad microbiana requerida. Dejar secar 5 minutos tras la aplicación.

Contiene otros componentes

Cloruro de didecildimetilamonio 0.30%
Bis(3 - aminopropil) dodecilamina ... 0.25%
Excipientesc.s.p. 100%